

Hersteller

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG
Oskar-Schindler-Str. 4
50769 Köln
Germany

Telefon: +49 221 70936-0
Fax: +49 221 70936-66
E-Mail: info@bauschdental.de
Internet: www.bauschdental.de



Stand der Gebrauchsanweisung: 2019-12-06

1 Allgemeine Beschreibung und Zweckbestimmung des Produkts

Der Y-Halter ist ein Labor-Instrument, hergestellt aus Edelstahl, zur einfacheren Handhabung breiter Artikulationsseiden oder Occlusionsprüffolien im Artikulator.

Der Y-Halter ist nicht zur Anwendung am Menschen vorgesehen und ist kein Medizinprodukt!

Der Y-Halter ist sterilisierbar.

Indikation

Labor-Instrument.

Kontraindikation

Nicht zur Anwendung am Menschen vorgesehen!

Nebenwirkungen

N/A.

2 Hinweise

- Vor der Benutzung ist der Y-Halter (Instrument) ggf. zu reinigen, zu desinfizieren und zu sterilisieren.
- Das Instrument kann mit Dampf (feuchte Hitze, 134°C) sterilisiert werden.
- Das Instrument kann zusammen den Artikulationsseiden oder Occlusionsprüffolien der Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG verwendet werden.
- Entsorgung: Das Instrument ist mit dem laborüblichen Abfall zu entsorgen.

3 Packungsinhalt

- 1 Y-Halter (BK 140)
- Gebrauchsanweisung

4 Vorbereitung

Das Instrument sollte vor der Anwendung gereinigt werden. Dies gilt insbesondere auch für die Erstanwendung nach der Auslieferung, da das Instrument unsteril ausgeliefert wird.

5 Anwendung

- Das Okklusionsprüfmittel (z.B. Seide oder Folie) so in den Halter einlegen, dass es allen Seiten über die Klemmbacken hinausragt.
- Die Klemmbacken durch Verschieben des Verschlussschiebers am Griff schließen.
- Die Okklusionsprüfung am Modell im Artikulator durchführen.
- Nach erfolgter Okklusionsprüfung den Y-Halter durch Zurückschieben des Verschlussschiebers öffnen und das gebrauchte Okklusionsprüfmittel mit dem laborüblichen Abfall entsorgen.
- Den Y-Halter ggf. für die Wiederaufbereitung vorbereiten.


6 Entsorgungshinweise

Das Instrument ist mit dem üblichen Laborabfall zu entsorgen.

7 Symbole



Hersteller

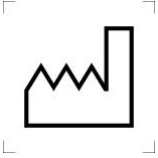

Herstelldatum



„GEBRAUCHSANWEISUNG BEACHTEN“



Bestellnummer



Unique Device Identifier (eindeutiger Produktidentifikator)



Konformität mit den relevanten EU-Regularien