


Zur Markierung der Position der ersten okklusalen Kontakte vor der Anpassung.


Datum:

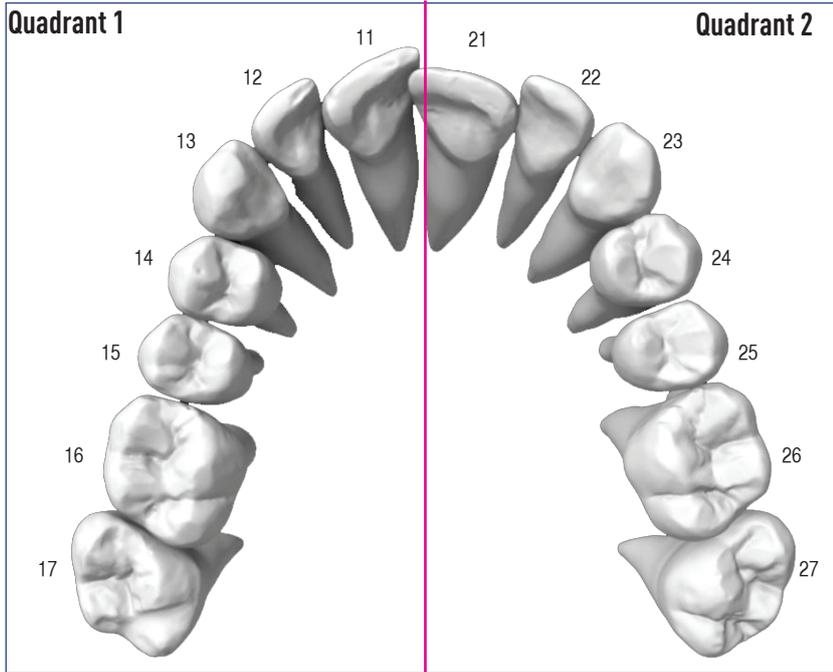

Dok-Nr.:

Patient:

Behandler/-in:

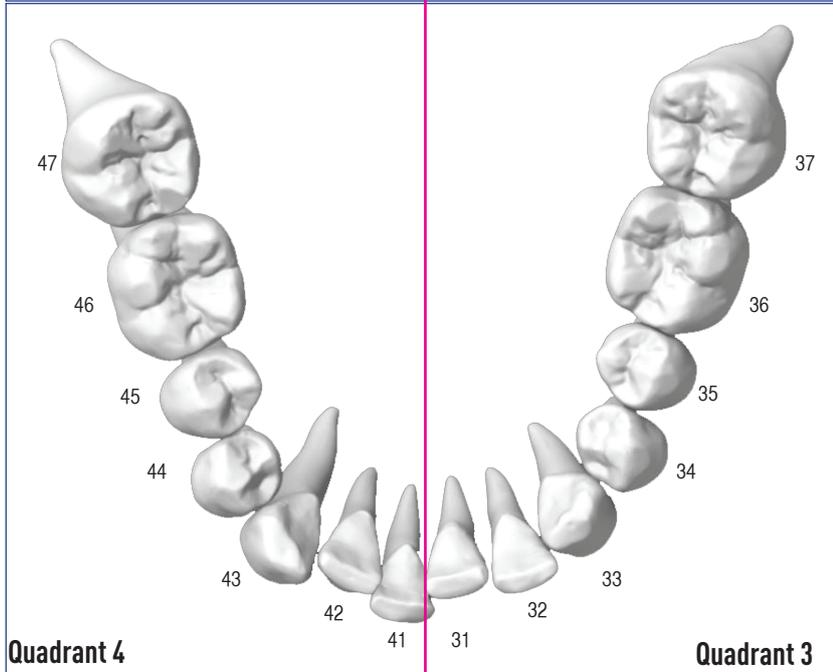

Notizen:

2. Protokoll: Shimstock Hold

Zum Archivieren der Position, an der der Shimstock gehalten oder durchgezogen wird

Bringen Sie Ihren Patienten in eine aufrechte Position. Die Zähne sollten sich in maximaler Interkuspitation befinden, der Patient beißt nur leicht darauf, mit geringem Muskeltonus. Prüfen Sie Zahn für Zahn und tragen Sie das Ergebnis in den Bogen ein.

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

X = halten ; 0 = durchziehen (kein taktile Kontakt)

- Empfohlene Testmaterialien:**
 Bausch Artikulationspapiere ø 100 µm REF: BK 51, BK 52, BK 53, BK 54....
 Bausch Artikulationspapiere ø 40 µm REF: BK 09, BK 10, BK 80, BK 81....
 Bausch Arti-Fol Metallic (Shimstock) ø 12 µm REF: BK 30, 31, 32, 33
 Bausch Arti-Fol Metallic (Shimstock) vorgeschchnittene Streifen ø 12 µm REF: BK 35, BK 38
 Bausch Arti-Fol Pinzette BK 132 + Arti-Grip Silikonhülsen BK 146



Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG | Oskar-Schindler-Str. 4 | D-50769 Köln - Germany
 Telefon: +49-221-70936-0 | Fax: ++49-221-70936-66
 info@bauschdental.de | www.bauschdental.de